



MANUAL DE USO

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO



ATENDIMENTO AO CLIENTE: sac@cseg.com.br | (11) 2892-4375

CÓDIGO	TAMANHO	MANEQUIM*
CSEG04001, CSEG04001EL	P	38 à 40
CSEG04002, CSEG04002EL	M	40 à 42
CSEG04003, CSEG04003EL	G	44 à 46
CSEG04004, CSEG04004EL	XG	48 à 50

*Medidas conforme Norma ABNT NBR 16060:2012



Produzido com matéria-prima que não contém substâncias que podem oferecer perigo ao usuário e, quando descartadas corretamente, não causam danos ao meio-ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Confeccionado com elásticos e velcro de alta qualidade proporcionando maior resistência e durabilidade.

INDICAÇÕES

Recomendável para diminuir e amenizar lombalgias e fadiga causada por levantamento de peso, reduzindo o risco de acidentes.

Indicado para motoristas, operadores de almoxarifado e atividades onde haja levantamento de peso, movimentos de flexão, carregamento de materiais, exercícios físicos e movimentos intensos de coluna.

CONTRA INDICAÇÕES

Este produto é utilizado para uso preventivo. Caso o usuário apresente dores ou problemas de coluna, o cinturão não deve ser utilizado sem orientação médica. O uso da Cinta Ergonômica não impedirá que o usuário possa sofrer ferimentos e não deve ser utilizado para superar deficiências físicas.

RISCOS À INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO

TEMPERATURA: Este equipamento deve ser utilizado à temperatura ambiente.

CORTES E ABRASÃO: Atrito com superfícies abrasivas e arestas cortantes podem danificar o equipamento.

PRODUTOS QUÍMICOS: Não permitir contato com nenhum produto químico, material corrosivo ou solvente.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

MODODE USO

1. Vista os suspensórios, posicionando a parte traseira da cinta (apoio lombar) centralizado nas costas/lombar.
2. Posicione a cinta na altura do umbigo, protegendo toda a região lombar.
3. Transpasse a cinta e o velcro para fechar.
4. Puxe as abas elásticas laterais e fixe o velcro com pressão confortável.
5. Regule a altura dos suspensórios.

Imagens Ilustrativas



Para a eficiência completa do produto é necessário um modo de levantamento adequado do material.

Firme os pés e levante corretamente o peso junto ao corpo, mantendo a postura lombar. Faça a força com os músculos abdominais.



GARANTIA

Nossa Política de Garantia está em acordo com a legislação vigente de Defesa do Consumidor. Este equipamento tem garantia de 3 meses, excluindo defeitos provenientes de desgaste natural ou por uso severo; conservação, manutenção e utilização inadequada ou negligente; qualquer eventual acidente que possa danificar o produto; falta de manutenção e limpeza adequadas; oxidação por salinidade, transpiração do corpo, armazenamento com o equipamento ainda úmido ou molhado; quaisquer ocorrências ou utilizações que não estejam indicadas no manual de uso. São inúmeras as possibilidades de ocorrências e utilizações inadequadas, portanto só utilize o equipamento como expresso neste manual. **QUALQUER ALTERAÇÃO NO PRODUTO RESULTARÁ EM PERDA TOTAL DA GARANTIA.** Para solicitar a garantia, conserto ou análise técnica do equipamento, o cliente deverá entrar em contato através do e-mail sac@cseg.com.br munido de Nota Fiscal (comprovante da data da compra).



EM CASO DE AVARIA ,DESGASTE SEVERO OU ALTERAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, DESCARTAR O EQUIPAMENTO